

Sie erhalten mit dem Erwerb des USTOMED Dauerfilters ein hochwertiges Produkt, welches im Folgenden dargestellt wird.

## 1. Allgemeines

Der neue USTOMED Dauerfilter ist ein weiterer Schritt zu mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei der Aufbereitung bzw. Sterilisation von Medizinprodukten.

Der USTOMED Dauerfilter bietet gegenüber Einmalfiltern und den bisherigen Langzeitfiltern aus Textilmaterial folgende Vorteile:

- Anzahl der Sterilisationszyklen > 1200,
- Passend für alle USTOMED Dental-Steril-Container,
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch Verringerung der Verbrauchskosten,
- Zeitersparnis durch geringen Aufwand der Filterkontrolle und der Vermeidung des Filterwechsels.

## 2. Anwendung / Handhabung

- Die Handhabung bzw. das Einlegen des Dauerfilters ist unverändert zu den bisher verwendeten Filtern,
- Die Dauerfilter dürfen nur von unterwiesenem bzw. ausgebildetem Personal gehandhabt werden, um Beschädigungen zu verhindern,
- Vor jedem Sterilisationszyklus ist der Dauerfilter auf Beschädigung zu kontrollieren,
- Die Filterhaltung muss nach dem Einlegen des Dauerfilters so angedrückt werden, dass sie hörbar einrastet,
- Die Dauerfilter müssen nicht gereinigt werden und können bis zum Ende der Verwendung in der Filterhalterung verbleiben.

## 3. Material

PTFE (Teflon®)

Das Verfahren zur Filtration verschiedenster Medien mit PTFE Filtern ist schon lange bekannt und wurde jetzt auch für den Einsatz in Sterilisationscontainern nutzbar gemacht.

## 4. Prüfungen / Untersuchungen

Zum Nachweis der Eignung der Dauerfilter wurden von einem unabhängigen und akkreditierten Prüflabor Untersuchungen durchgeführt.

Als Ergebnis konnte folgendes festgehalten werden:

Die verwendeten USTOMED PTFE Dauerfilter sind dazu geeignet, Keimwachstum gemäß den Anforderungen der DIN 58953 Teil 6, Kapitel 2.14 zu verhindern.

Das entsprechende Gutachten erhalten Sie von uns auf Anfrage.

## 5. Besondere Hinweise

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Dauerfilter beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Durchstechen Sie nie die Sterilfilter!

- Vermeiden Sie das Ablegen von spitzen und scharfen Gegenständen auf den Sterilisationscontainer.

## Teflon-Dauer-Filter

Kat. Nr. 90-640-002

90-642-002

## Produktinformation

Erstelldatum: 18.11.2015



USTOMED INSTRUMENTE

Ulrich Storz GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 2

D-78532 Tuttlingen

- Vermeiden Sie das Eindringen von Keimen durch:
- Verschütten von Schmutz-, Reinigungs-, oder Desinfektionslösungen,
- Eindringen von kontaminiertem Außenkondensat (z. B. durch Zwischenräume beim Stapeln von heißen Containern),
- Einreiben von Staub und Schmutz in den Filter beim Abwischen der Container,
- Langzeitlagerung.

### 6. Entsorgung

Nach dem Gebrauch können die Dauerfilter der praxisüblichen Entsorgung zugeführt werden. Es sind keine besonderen Maßnahmen notwendig.

### 7. Gewährleistung

Die Dauerfilter wurden aus einem hochwertigen Material hergestellt und vor der Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollten dennoch Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die oben aufgeführte Adresse.

Techn. Änderungen vorbehalten.